






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











Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Häufigkeit
		Präparat/ Produkt	Konz. / EWZ	
 Hygienische Händedesinfektion	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregert-haltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	Sterillium® - einreiben -	gebr.- fertig 30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibungsmethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
 Chirurgische Händedesinfektion	Vor chirurgischen Eingriffen.	Sterillium® - einreiben -	gebr.- fertig 1,5 Min.	Aus dem Spender entnehmen. Hände und Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben, während der gesamten EWZ feucht halten. Hände gezielt nach Standard-Einreibungsmethode desinfizieren.
 Händedesinfektion bei punktueller Verunreinigung	Bei Bedarf.	Sterillium® - einreiben -	gebr.- fertig 30 Sek.	Beschmutzte Stelle mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Zellstoff oder Wattebausch reinigen. Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen.
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	Baktolan® protect - einreiben -	gebr.- fertig	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 Händereinigung	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	Baktolin® - waschen -	gebr.- fertig	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	Baktolan® - einreiben -	gebr.- fertig	Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
		Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.- fertig 5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
		Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.- fertig 5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 Hautantiseptik	Vor Blutentnahmen und Injektionen.	Cutasept® F -sprühen/ wischen -	gebr.- fertig mind. 15 Sek.	Aufsprühen – mit sterilisiertem Tupfer einreiben. Nochmals aufsprühen. Vollständig abtrocknen lassen.
 Instrumente (Abformlöffel, Trays, Gläser, Absaugkanülen etc.)	Nach jeder Behandlung.	Korsolex® plus (Ultraschallbad)	3,0 % 15 Min.	Desinfizieren und reinigen, abspülen, trocknen, kontrollieren, wenn erforderlich sterilisieren.
		Bodedex® forte	0,5-1 %	
 chir. Instrumente (Zangen, Spritzen, Parantologie-Instrumente, Abdrücke etc.)	Nach jeder Untersuchung.	Korsolex® AF	3,0 % 15 Min.	Desinfizieren und reinigen, abspülen, trocknen, kontrollieren, wenn erforderlich sterilisieren.
 Rotierende Instrumente (Strahlbohrer, Fräser, Diamant schleifer etc.)	Nach jeder Untersuchung.	Korsolex® Bohrerbad Fräsator	gebr.- fertig 5- 15 Min.	Einlegen in Desinfektionslösung; nicht mit Wasser nachspülen, trocknen, kontrollieren, sterilisieren.
 Inventar Patientstuhl, Schwebetisch, etc.	Täglich. Nach Kontamination sofort.	Bacillo® AF -sprühen/ wischen -	gebr.- fertig 5 Min.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Medizinische Geräte	Täglich. Bei Bedarf.	Dismozon® pur - wischen -	0,5 % 1 Std.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Herstellerangaben beachten.
 Arbeitsflächen	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	Bacillo® AF -sprühen/ wischen -	gebr.- fertig 5 Min.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Herstellerangaben beachten.
 Fußböden Wände, Abfalleimer Toiletten Waschbecken	Täglich.	Dismozon® pur und Dismofix® G - wischen -	0,5 % 1 Std.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
 Absauganlagen	Nach jeder Behandlung kaltes Wasser durchsaugen. Bei Bedarf, mind. aber 1 x täglich (nach Arbeitsende).	Mikrobac® dent	2,0 % 5 Min.	Desinfizieren, reinigen; langsames Durchsaugen eines Gemisches aus Luft und Desinfektionslösung.

